

Insulclock
Model Pentru SoloStar®


Instrucțiuni De Utilizare



Înainte de a utiliza Insulclock® v2.0 Lite (denumit în continuare Insulclock®), citește toate

informațiile și urmează pas cu pas, cu atenție, toate instrucțiunile.

Părțile componente ale Insulclock®

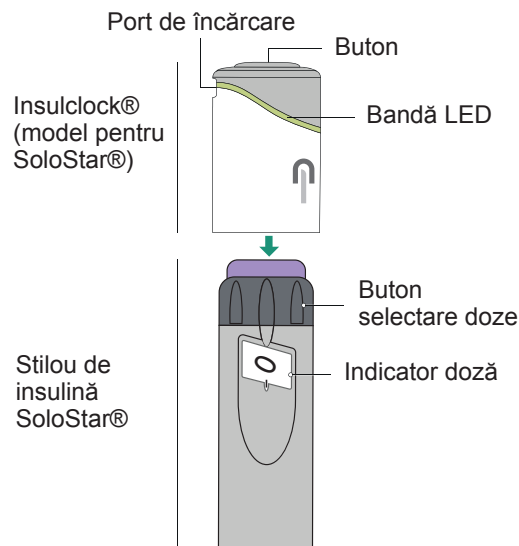

Depozitare și manipulare

⚠ Condiții adecvate de depozitare

	TEMPERATURĂ	PRESIUNE ATMOSFERICĂ	UMIDITATE RELATIVĂ
DEPOZITARE ȘI MANIPULARE	0°C până la 40°C	0,7 până la 1,2 atm	5% până la 95%

⚠ Păstrați Insulclock® departe de copii și animale de companie.



⚠ Insulclock® este un dispozitiv pentru un singur pacient, utilizabil de mai multe ori. Nu împărtășiți Insulclock® cu alți pacienți.




Aruncați sau nu utilizați dispozitivul în cazul în care a fost expus la greutate sau stres mecanic.

Aruncați Insulclock® după 1 an de la prima utilizare.

Pregătirea pentru utilizare

1 Verifică compatibilitatea stiloului

Scanează codul QR de mai jos pentru a verifica compatibilitatea cu SoloStar®.

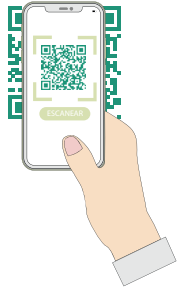

⚠ Insulclock® funcționează doar cu un stilou de insulină de unică folosință SoloStar® compatibil.

2 Citește instrucțiunile stiloului



Citește Instrucțiunile de Utilizare ale stiloului tău de insulină de unică folosință SoloStar® (fabricat de Sanofi®).

3 Verifică dacă există deteriorări



Verifică Insulclock® pentru deteriorări înainte de fiecare utilizare. Aruncă-l dacă a fost expus la situații periculoase.

4 Verifică bateria



Verifică bateria* Insulclock® înainte de fiecare utilizare. Insulclock® este livrat împreună cu un încărcător și un cablu USB-C.

*Consultă punctul 6 din secțiunea „Indicații privind Insulclock®” de pe pagina următoare.


5 Verifică starea de curățare



Asigură-te că Insulclock® este curat* înainte de fiecare utilizare.

Consultă punctul 1 din secțiunea „Despre Insulclock®” de pe verso.


6 Verifică compatibilitatea aplicației

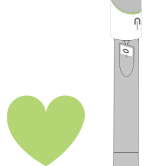


Asigură-te că folosești o aplicație mobilă (App) compatibilă (vezi „8. Conectare cu o aplicație”).

7 Atașează Insulclock® la SoloStar®


A) Introdu Insulclock® pe stiloul de insulină de unică folosință, așa cum este arătat în imagine, acoperind complet butonul de selectare a dozelor.

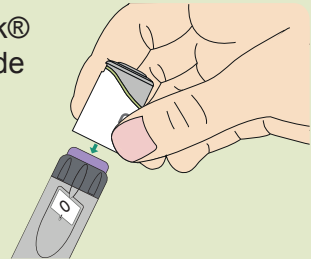

⚠ Asigură-te că proeminența selectorului de doză este aliniată cu banda neagră din interiorul Insulclock®.

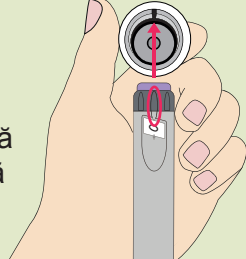

B) ⚠ Asigură-te că poți roti butonul de selectare a dozelor în mod normal.

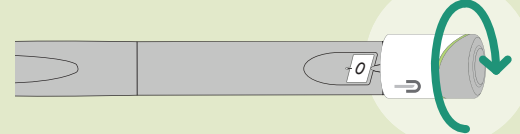

- ⚠ - Verifică eticheta stiloului pentru a te asigura că ai un stilou de insulină de unică folosință SoloStar®.
- Verifică dacă Insulclock® este fixat ferm: butonul dozelor trebuie să fie complet introdus în Insulclock®.
- Asigură-te că poți roti butonul dozelor în mod normal.
- ⚠ - Asigură-te că indicatorul de doză de pe stiloul tău este setat la „0” (zero) în timp ce atașezi Insulclock®.
- Nu răsuca Insulclock® în timp ce îl atașezi la stiloul de insulină de unică folosință.

8 Conectare cu aplicația



A) Scanează codul QR de mai jos pentru a descărca o aplicație compatibilă



⚠ Sisteme de operare necesare: iOS (versiunea 15.0 sau ulterioară); Android (versiunea 8.0 sau ulterioară).

B) Așază smartphone-ul lângă Insulclock®. Distanța dintre ele nu trebuie să depășească 3 metri.

⚠ Bluetooth-ul smartphone-ului tău trebuie să fie activat.

C) ⚠ Deschide aplicația și urmează instrucțiunile acesteia pentru a finaliza cu succes conectarea Insulclock®.

Dacă transferul de date al Insulclock® durează mai mult de 5 minute, ar trebui să contactați producătorul.

Împerecherea înseamnă conectarea Insulclock®-ului tău cu o aplicație compatibilă.

Notă: Trebuie să îți împerechezi Insulclock® cu aplicația doar o singură dată.

Conectarea/sincronizarea înseamnă că are loc un transfer de date între Insulclock®-ul tău și o aplicație compatibilă.

- ⚠ - Insulclock®-ul tău trebuie să fie împerecheat și conectat la o aplicație înainte de a transfera informațiile înregistrate.
- Bluetooth-ul telefonului tău trebuie să fie pornit pentru a împerechea/conecta/sincroniza Insulclock®-ul cu aplicația.
- Folosește instrucțiunile telefonului tău pentru a activa Bluetooth-ul.
- Insulclock®-ul tău trebuie să fie încărcat pentru a se împerechea/conecta/sincroniza cu aplicația.
- Conexiunea wireless poate dura ceva timp pentru a se finaliza.
- Deschide aplicația și urmează indicațiile acesteia pentru a finaliza cu succes împerecherea Insulclock®-ului tău.
- O **lumină albastră** va apărea pe banda LED a Insulclock®-ului tău odată ce Insulclock® și aplicația sunt împerecheate/conectate/sincronizate corect. Dacă ai vreo nelămurire, te rugăm să consulți ghidul aplicației.
- Insulclock® este proiectat să fie utilizat împreună cu o aplicație compatibilă asociată, care permite transferul de date, configurarea și actualizarea Insulclock®. De fiecare dată când folosești Insulclock® fără aplicație, funcționalitățile Insulclock® pot fi limitate:
 - Există riscul de pierdere a datelor dacă memoria internă a Insulclock® este plină (capacitate maximă de stocare de 35 de injecții/amorsări).
 - Nu poți verifica nivelul bateriei.
 - Alarmele setate nu vor funcționa.
 - Nu poți verifica expunerea Insulclock®-ului la temperaturi specifice.
 - Nu poți specifica dacă folosești un tip de insulină cu acțiune scurtă sau lungă.

Amorsarea stiloului injector

Priming(amorsare) înseamnă eliminarea aerului din ac și din cartușul stiloului, care se poate acumula în timpul utilizării normale.


IMPORTANT

Scanează codul QR pentru a vedea cum să îți corect stiloul în timpul amorsării.




⚠ Îndepărtează capacul acului înainte de a face amorsarea.

1) Rotește butonul dozei pentru a selecta cel puțin 2 unități.

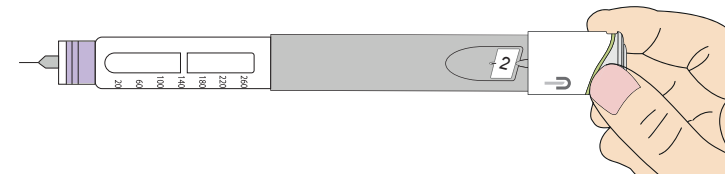


2) Ține stiloul vertical, cu acul îndreptat în sus, așa cum este arătat în imaginea de mai jos:

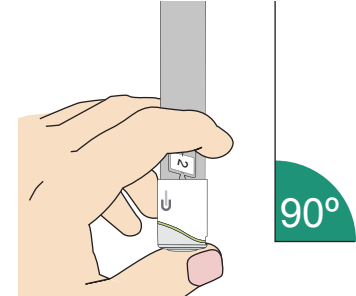

90°

3) Continuă să ții stiloul vertical, cu acul îndreptat în sus, în timp ce apeși ferm și menții apăsat butonul Insulclock® (aproximativ 3 secunde), până când vezi o lumină albă pe banda LED și se aude un sunet timp de 1 secundă.

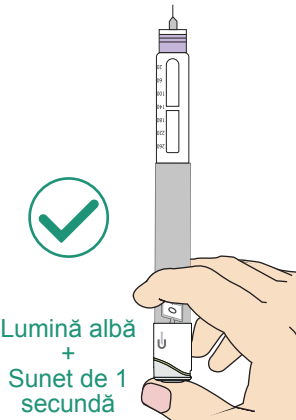


Lumină albă + Sunet de 1 secundă

IMPORTANT: Unghiul de amorsare și timpul de apăsare sunt cerințe pentru înregistrarea în aplicație.



4) Asigură-te că iese puțină insulină din ac.

5) ⚠ Dacă nu iese insulină, repetă procesul până când apare.

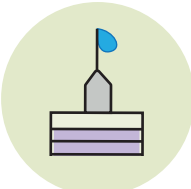

6) ⚠ Verifică dacă indicatorul dozei de pe stiloul tău a revenit la „0” (zero) după amorsare.

7) ⚠ Verifică dacă datele transferate în aplicație sunt corecte și dacă vezi clar informațiile despre amorsare în aplicație.

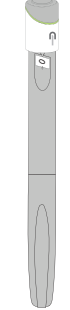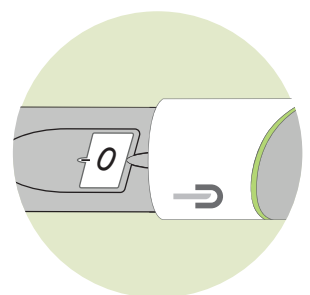


- ⚠ *Dacă problema persistă, folosește un ac nou, verifică dacă Insulclock® este poziționat corect și repetă pașii menționați mai sus.
- Dacă încă nu funcționează, este posibil să fie nevoie să folosești un SoloStar® nou.

- ⚠ - Asigură-te că Insulclock®-ul tău are suficientă baterie. Dacă nu ești sigur că Insulclock® are energie, deschide aplicația compatibilă pentru a verifica nivelul bateriei și încarcă Insulclock®-ul dacă nivelul bateriei este sub 20%.
- Asigură-te că Insulclock® este deconectat de la o sursă de energie.
- Verifică dacă Insulclock® este atașat corect la stiloul de insulină de unică folosință SoloStar®.
- Verifică dacă orientezi corect stiloul în timpul amorsării.
- Lumina albă pe banda LED și sunetul de 1 secundă îți vor indica că amorsarea a fost efectuată cu succes.


Administrează doza de insulină

1) ⚠ Se recomandă insistent să apeși de două ori butonul Insulclock® ca prim pas, înainte de a selecta doza dorită de insulină*.

2) Privește indicatorul dozei de pe SoloStar® și rotește Insulclock® pe stilou pentru a selecta doza dorită de insulină.

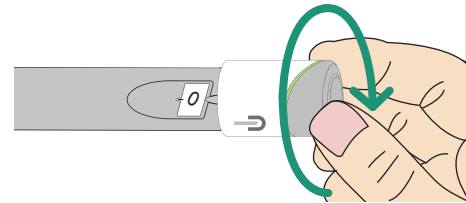


3) Administrează doza apăsând ferm și menținând apăsat butonul Insulclock® (aproximativ 6 secunde), până când vezi o lumină verde pe banda LED și se aude un sunet timp de 3 secunde**.

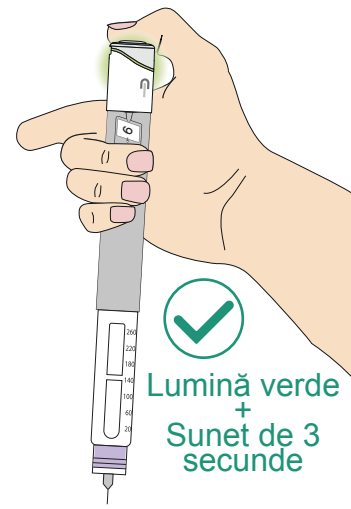


Lumină verde + Sunet de 3 secunde

Lumina roșie și sunetul de 1 secundă după o injecție înseamnă că timpul de apăsare a butonului în timpul injecției a fost insuficient.

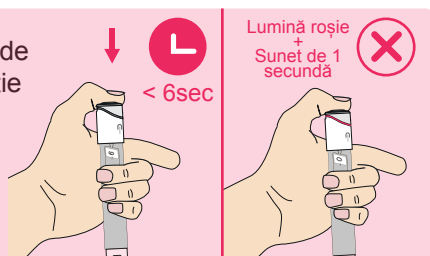


4) ⚠ Verifică dacă indicatorul dozei de pe stiloul tău a revenit la „0” (zero) după injecție.

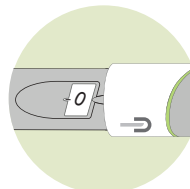

5) ⚠ Asigură-te că vezi clar informațiile despre injecție în aplicație.



6) Ar trebui să ții Insulclock® atașat la stiloul de insulină de unică folosință pe care îl folosești până când stiloul este gol și/sau trebuie să-l arunci.

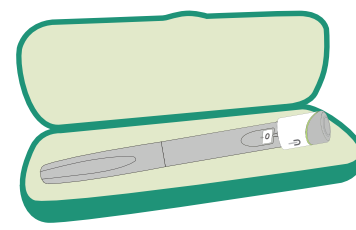

⚠ *Pentru mai multe informații despre semnificația indicațiilor, consultă „Indicații pe Insulclock®-ul tău”. Înainte de a-ți administra doza de insulină, asigură-te că amorsezi stiloul de insulină de unică folosință SoloStar® conform secțiunii anterioare.

⚠ **După injecție, dacă vezi o lumină roșie în loc de verde și se aude un sunet timp de 1 secundă, este posibil să nu fi apăsat suficient timp butonul Insulclock® în timpul injecției.

- Când folosești Insulclock®, nu repeta și nici nu sări peste doza de insulină, deoarece acest lucru poate duce la niveluri scăzute sau ridicate ale glicemiei. Monitorizează-ți glicemia și consultă-te cu profesionistul tău din domeniul sănătății.
- Acuratețea măsurării dozei: ± 1.
- Este posibil să existe limitări de design ale Insulclock® care pot duce la date inexacte sau lipsă. Se recomandă să apeși de două ori butonul Insulclock® ca prim pas înainte de a selecta doza dorită de insulină. Pentru mai multe informații despre semnificația indicațiilor, consultă „Indicații pe Insulclock®-ul tău”.
- Administrează-ți doza de insulină conform Instrucțiunilor de Utilizare ale stiloului de insulină de unică folosință SoloStar® și urmează întotdeauna indicațiile profesionistului tău din domeniul sănătății.
- Asigură-te că Insulclock®-ul tău are suficientă baterie. Dacă nu ești sigur că Insulclock® are energie, deschide aplicația compatibilă pentru a verifica nivelul bateriei și încarcă Insulclock®-ul dacă nivelul este sub 20%.
- Asigură-te că Insulclock® este deconectat de la sursa de alimentare.
- Verifică dacă Insulclock® este atașat corect la stiloul de insulină de unică folosință SoloStar®.
- Asigură-te că apeși Insulclock® drept în jos când îți administrezi doza. Dacă nu apeși Insulclock® drept în jos, este posibil să primești mai multă sau mai puțină insulină decât cea selectată.
- Utilizează Insulclock® într-un loc liniștit atunci când îți administrezi doza de insulină.
- Trebuie să manevrezi Insulclock® ferm atunci când îți selectezi doza de insulină și îți administrezi injecția. Orice rotire sau mișcare a stiloului de insulină de unică folosință poate provoca o eroare în proces.
- Nu folosi Insulclock® în condiții de vibrații puternice (de exemplu, într-un vehicul în mișcare), deoarece dozele de insulină înregistrate pot avea o marjă de eroare.

Indicații pe Insulclock®


1 CÂND: apeși de două ori pentru a verifica ora ultimei injecții.

LUMINĂ VERDE,
FĂRĂ SUNET



- ⚠️ Semnificație: nicio doză de insulină înregistrată în:
- ultimele 2 ore (pentru tipul de insulină cu acțiune scurtă selectat în aplicație).
 - sau ultimele 8 ore (pentru tipul de insulină cu acțiune lungă selectat în aplicație).

2x

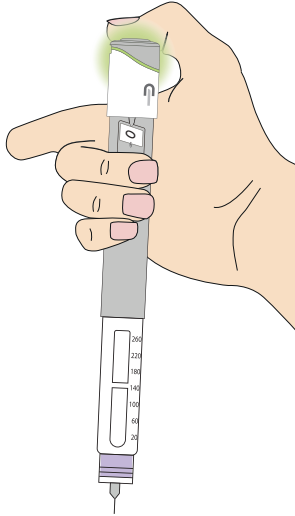

LUMINĂ ROȘIE,
FĂRĂ SUNET



- ⚠️ Semnificație: cel puțin o doză de insulină înregistrată în:
- ultimele 2 ore (pentru tipul de insulină cu acțiune de scurtă durată selectat în aplicație).
 - sau ultimele 8 ore (pentru tipul de insulină cu acțiune de lungă durată selectat în aplicație).

2 CÂND: setezi o alertă în aplicație.

LUMINĂ ALBASTRĂ,
FĂRĂ SUNET



- ⚠️ Semnificație: alerta a fost setată cu succes pe Insulclock® și sincronizată cu aplicația.

3 CÂND: este timpul alertei de reamintire setate anterior în aplicație.

LUMINĂ ALBASTRĂ,
SUNET DE 5 SECUDE



- ⚠️ Semnificație: alerta apare la timpul programat anterior în aplicație.
- ⚠️ Poți seta până la 5 (cinci) alarme la ore diferite ale zilei.

- ⚠️ Dacă ai vreun dubiu cu privire la semnificația indicațiilor Insulclock®, fie lumini, fie sunete, te rugăm să revizuiești toate instrucțiunile pas cu pas încă de la început sau să contactezi producătorul.
- ⚠️ - Dacă nu ești sigur dacă ți-ai făcut injecția sau nu, nu începe din nou și nu repeta injecția.
- ⚠️ - Dacă nu ai specificat tipul de insulină în timpul împerecherii Insulclock®-ului cu aplicația, parametrul implicit este setat pentru insulină cu acțiune scurtă.
- ⚠️ - Amintește-ți să specifice tipul de insulină în aplicație de fiecare dată când schimbi tipul de insulină SoloStar® pe care îl folosești cu Insulclock®.

4 CÂND: cauți Insulclock®-ul tău folosind această funcție a aplicației.

LUMINĂ ALBASTRĂ,
SUNET DE 6 SECUDE



- ⚠️ Semnificație: semnalele Insulclock® te ajută să-l găsești.

5 CÂND: Insulclock® a fost expus la temperaturi mai mici de 2°C sau mai mari de 30°C.

LUMINĂ ROȘIE CLIPITOARE,
FĂRĂ SUNET



- ⚠️ Semnificație: Insulclock® a fost expus la temperaturi mai mici de 2°C sau mai mari de 30°C.

Pentru a opri această alertă, apasă de două ori butonul Insulclock® sau începe procesul de amorsare.

- ⚠️ Consultă Instrucțiunile de Utilizare ale stiloului de insulină de unică folosință SoloStar® pentru a vedea dacă este necesară vreo acțiune atunci când stiloul este expus în afara acestor limite de temperatură.

6 CÂND: În timpul încărcării bateriei, cu Insulclock® conectat la o sursă de energie.

LUMINĂ ALBĂ,
FĂRĂ SUNET



- Semnificație: Insulclock® încarcă bateria.
- Descriere: Pentru a evita erorile în timpul încărcării bateriei, o lumină albă pe banda LED te va avertiza că Insulclock® este conectat corect la cablul USB și la încărcător.

LUMINĂ VERDE,
FĂRĂ SUNET



- Semnificație: Bateria Insulclock®-ului tău este încărcată 100%.
- Descriere: Pentru a preveni erorile de încărcare a bateriei, atunci când Insulclock® este încă conectat la cablul USB și la încărcător, o lumină verde pe banda LED îți va indica că Insulclock® este complet încărcat.

Despre Insulclock®

Aceste informații nu înlocuiesc discuția cu profesionistul tău din domeniul sănătății despre starea ta medicală sau tratament. Dacă apar nelămuriri legate de tratamentul tău, te rugăm să consulți profesionistul tău din domeniul sănătății.

Descrierea dispozitivului

Insulclock® îți permite să detectezi și să stochezi amorsările și dozele de insulină, ziua și ora injecției, temperatura ambientală și să transmiți toate aceste informații către o aplicație mobilă compatibilă.

Utilizare prevăzută

INSULCLOCK® v2.0 lite este un dispozitiv medical destinat utilizării cu stiloul de insulină de unică folosință pentru a înregistra și stoca datele privind amorsarea, doza de insulină, data și ora injecției, precum și temperatura ambientală, și permite transferul acestor date către o aplicație mobilă asociată, pe lângă generarea de alerte vizuale și sonore, pentru a ajuta la îmbunătățirea aderenței la terapia cu insulină multidoză la pacienții diagnosticați cu diabet zaharat de tip 1 sau tip 2.

Indicații de utilizare

- Insulclock® este destinat pacienților care utilizează stilouri de insulină de unică folosință, diagnosticați cu diabet zaharat de tip 1 sau II.
- Insulclock® este destinat persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani. În afara acestui interval de vârstă, Insulclock® trebuie utilizat sub supraveghere.
- Insulclock® este conceput pentru utilizare în orice mediu casnic.
- Se utilizează împreună cu o aplicație compatibilă. Verifică aplicațiile compatibile la pasul 8 din PREGĂTIRE PENTRU UTILIZARE.

Performanța esențială

Performanța esențială a Insulclock® este de a înregistra utilizarea insulinei de către pacienții cărora li s-a prescris un stilou de insulină de unică folosință și de a transmite datele, prin Bluetooth Low Energy (BLE), către o platformă mobilă.

Mediul de utilizare

Insulclock® este conceput pentru utilizare în orice mediu casnic.

Dacă ai întrebări despre tratamentul tău, te rugăm să consulți profesionistul tău din domeniul sănătății.

Beneficii și riscuri asociate Insulclock®


Ca orice dispozitiv medical, utilizarea Insulclock®-ului implică atât beneficii, cât și riscuri.

Înainte de a folosi Insulclock®, citește toate informațiile, inclusiv avertismentele și precauțiile, pentru a înțelege riscurile. Consultă-te cu profesionistul tău din domeniul sănătății dacă ai nelămuriri privind utilizarea în siguranță a Insulclock®.

Accesorii

Insulclock® este echipat cu un încărcător de priză și un cablu USB-C.

Se recomandă să încarci dispozitivul înainte de prima utilizare și, după prima utilizare, să-l încarci frecvent înainte ca bateria Insulclock® să se descarce complet.

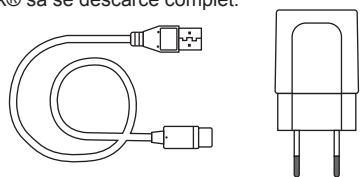

1. Instrucțiuni de curățare

Asigură-te că dispozitivul Insulclock® este curat înainte de fiecare utilizare.

- ⚠️ - Nu folosi Insulclock® dacă pare murdar. Dacă orice substanță pătrunde în dispozitiv, curăță-l imediat.

- 01** Deconectează cablul USB-C de la Insulclock®, dacă este necesar.
- 02** Folosește o cârpă ușor umedă pentru a șterge suprafața Insulclock®.
- 03** Inspectează vizual Insulclock® pentru a te asigura că este curat.
- 04** Dacă nu îndeplinește încă criteriile de igienă, te rugăm să repeți pașii 2 și 3.

- ⚠️ - Previne pătrunderea apei în deschiderea USB.
- ⚠️ - Evită folosirea produselor de curățare sau dezinfectare, cum ar fi șervețelele cu alcool, pentru a curăța Insulclock®.

Dacă Insulclock® rămâne murdar după mai multe încercări de curățare, contactează producătorul pentru asistență.



2. Specificații tehnice

Proprietăți electrice ale Insulclock®:

- Gama de tensiune de intrare: 5V
- Putere maximă: 1W
- Baterie: reincărcabilă Li-ion: Li-ion 3.7V~122mAh
 - Număr model: CP 1654 A3.
 - Durată de funcționare cu bateria complet încărcată: 14 zile.
 - Timp de încărcare pentru bateria complet încărcată: 1 oră.

- ⚠️ Nu încerca să repari sau să înlocuiești bateria Insulclock®. Acest lucru îți poate provoca vătămări sau poate deteriora dispozitivul Insulclock®. Apasă butonul Insulclock® doar în timpul utilizării. Apăsările repetate pot reduce durata de viață a bateriei.

Proprietăți electrice ale încărcătorului de perete:

- Gama de tensiune de intrare: 90-264 Vca.
- Frecvență: 47-63 Hz.
- Putere maximă: 5 W.
- Tensiune de ieșire: 5 Vcc.

Bandă și gamă

Insulclock® emite radiații Bluetooth în frecvență de 2,4 GHz cu o intensitate maximă de 4 dBm. Insulclock® a trecut următoarele standarde:

UNE-EN 60601-1-2:2015 + A1:2021

Emisie: (Grupa 1 Clasa B)

- UNE-EN 55011:2016 + A1:2017 + A2:2021
- UNE-EN IEC 61000-3-2-2:2019 + A1:2021
- UNE-EN 61000-3-3:2013 + A1:2020 + AMD2:2021

Test de emisie RF (Radiofrecvență)	Conformitate	Ghid pentru mediul electro-magnetic
Emisie RF CISPR 11, IEC 60601-1-2	Grupa 1, Clasa B	Emisiile RF ale dispozitivului probabil nu vor cauza interferențe în echipamentele electronice din apropiere.

Echipamentele portabile de comunicații în frecvență radio trebuie utilizate la o distanță de cel puțin 30 cm (11,8 inch) față de orice parte a Insulclock®; în caz contrar, performanța esențială poate fi pierdută sau degradată din cauza perturbărilor electromagnetice.

Ghid pentru mediul electromagnetic: dispozitivul este potrivit pentru utilizare în medii domestice și de îngrijire medicală la domiciliu.			
TEST DE IMUNITATE	VALORI DE TEST	REZULTATE	GHID DE MEDIU ELECTRO-MAGNETIC
Descărcare electrostatică (ESD)	±2, ±4, ±8 și ±15 kV	ESTE CONFORM	IEC 61000-4-2
Emisie RF radiată	10 V/m 80-2700 MHz	ESTE CONFORM	IEC 61000-4-3
Descărcare rapidă electrică	2kV	ESTE CONFORM	IEC 61000-4-4
Suprasarcină (supratensiune)	0, 90, 180, 270° 1kV L-N	ESTE CONFORM	IEC 61000-4-5
Perturbări	3 Vrms 0,15 - 80 MHz 6 Vrms pe benzile ISM și amator între 0,15 - 80 MHz	ESTE CONFORM	IEC 61000-4-6
Câmp magnetic la frecvența rețelei	30 A/m	ESTE CONFORM	IEC 61000-4-8
Căderi de tensiune	100-240 V 50 Hz 0% din UN pentru 0,5 cicluri și unghiuri de fază de 0°, 45°, 90°, 180°, 225°, 270° și 315° 0% din UN pentru 1 ciclu și unghi de fază de 0° 70% din UN pentru 25/30 cicluri și unghi de fază de 0°	ESTE CONFORM	IEC 61000-4-11

3. Condiții de utilizare

- ⚠️ Insulclock® trebuie utilizat doar pentru scopul pentru care este destinat, descris în aceste Instrucțiuni de Utilizare.
- ⚠️ Verifică ambalajul Insulclock® pentru eventuale deteriorări înainte de prima utilizare. Aruncă-l dacă a fost expus unor situații periculoase.
- ⚠️ Insulclock® trebuie utilizat în condițiile de mediu specificate.
- ⚠️ Nu transfera Insulclock® de la un stilou la altul, cu excepția înlocuirii stiloului (de exemplu, când acesta este gol sau stiloul nu mai funcționează), deoarece Insulclock® este reutilizabil. Producătorul recomandă utilizarea unui singur Insulclock® pentru fiecare stilou de insulină de unică folosință SoloStar®, pentru a evita eventualele erori ale utilizatorului.
- ⚠️ Ține Insulclock® departe de copii și animale de companie. Piesele mici pot fi înghițite și pot cauza sufocare.
- ⚠️ Nu folosi și nu plasa Insulclock® în apropierea surselor de căldură, cum ar fi radiatoare, foc, etc.
- ⚠️ Nu plasa Insulclock® în cuptorul cu microunde.
- ⚠️ Nu utiliza Insulclock® în timpul condusului.
- ⚠️ Nu purta mănuși când folosești Insulclock®.
- ⚠️ Nu plasa LED-ul alb al dispozitivului aproape de ochi.
- ⚠️ Ține Insulclock® departe de materiale care i-ar putea împiedica utilizarea, cum ar fi părul sau firele desfăcute.
- ⚠️ Utilizarea Insulclock® în apropierea oricărui alt dispozitiv care poate emite perturbații electromagnetice trebuie evitată.
- ⚠️ Utilizarea autonomă a Insulclock® nu este recomandată pentru persoanele cu caracteristici speciale, cum ar fi:
 - probleme de vedere, precum orbirea sau daltonismul,
 - probleme de auz sau surditate,
 - persoane cu dizabilități,
 - vârstnici și copii (în afara intervalului de vârstă pentru utilizare), care ar putea avea nevoie de asistență din partea unei alte persoane pentru a putea folosi Insulclock®.
- ⚠️ Nu este permisă nicio modificare a Insulclock®.
- ⚠️ Nu modifica Insulclock® fără autorizarea producătorului.
- ⚠️ Dacă Insulclock® este modificat, trebuie efectuate inspecții și teste adecvate pentru a asigura utilizarea continuă în condiții de siguranță a echipamentului.

- ⚠️ - Nu poziționa lumina albă a benzii LED a Insulclock® aproape de ochii tăi.
- ⚠️ Menține Insulclock® și accesoriile sale uscate.

4. Siguranța cibernetică:

- 01** Nu instala niciodată aplicații din magazine neoficiale pe telefonul tău inteligent.
- 02** Folosirea unui smartphone de origine necunoscută prezintă riscuri.
- 03** Protejează-ți datele personale de sănătate folosind o parolă sau o metodă de autentificare biometrică (cum ar fi amprenta sau recunoașterea facială) pe smartphone-ul tău. Nu împărtăși aceste informații cu terțe părți.
- 04** Conectează Insulclock® la o aplicație într-un loc privat. Acest lucru te ajută să menții securitatea dispozitivului tău.
- 05** Folosește doar aplicații autorizate.
- 06** La conectarea la Wi-Fi, folosește doar rețele Wi-Fi sigure.
- 07** Menține sistemul de operare al smartphone-ului și aplicațiile actualizate la zi.
- 08** Evită să descarci software și fișiere din surse necunoscute pe smartphone-ul tău.
- 09** Revizuieste și înțelege permisiunile solicitate de aplicații înainte de a le instala.
- 10** Rămâi informat despre cele mai recente amenințări cibernetice și cele mai bune practici în domeniu.
- 11** Actualizează software-ul Insulclock® doar prin intermediul aplicațiilor autorizate. Înainte de a accepta o actualizare a software-ului Insulclock®, asigură-te că smartphone-ul tău este conectat la o rețea Wi-Fi securizată.
- 12** Folosește parole puternice și unice pentru contul tău din aplicație.
- 13** Dacă Insulclock® nu funcționează așa cum te aștepti sau conform instrucțiunilor de Utilizare, scoate-l de pe stiloul tău și contactează producătorul.

Gradul de protecție:

Dispozitivul nu este rezistent la apă. IP22 oferă protecție împotriva introducerii degetelor și nu va fi deteriorat sau periculos dacă este expus la picături de apă verticale sau aproape verticale.

Dacă ai întrebări sau probleme cu Insulclock®, contactează producătorul la +34 911 672 677 sau sună profesionistul din domeniul medical pentru ajutor. Pentru mai multe informații despre Insulclock®, accesează www.insulcloud.com/en sau trimite o cerere prin formularul de contact: www.insulcloud.com/en/contact.

Orice incident grav legat de Insulclock® trebuie raportat producătorului și autorității competente.

Insulcloud® este o marcă comercială a Insulcloud S.L.

Marca SoloStar® este o marcă înregistrată deținută de Sanofi®. Sanofi® nu are niciun acord sau relație cu Insulcloud S.L.

IFU_Insulclockv2.0lite_S_rev01.RO
Iunie 2025

Fabricat de:



Insulcloud S.L.
Cod fiscal: B-87131454
Sediul social înregistrat: Calle Alameda Mazarredo, 25 1º,
48009 Bilbao, Bizkaia, Spania
Sediul principal: Strada Bravo Murilo 101, etajul 2,
28020 Madrid, Spania.

SIMBOLURI

	Producător		A se proteja de căldură și de surse de radioactivitate
	Data fabricației		Limite de presiune atmosferică
	Consultați manualul de utilizare		Limite de umiditate
	Număr de lot		Limite de temperatură
	Nu aruncați la gunoii menajer		Parte aplicată BF
	Protecție împotriva obiectelor solide străine și a apei		Identificator Unic de Dispozitiv
	A se păstra la loc uscat		Marcajul CE
	A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat		Utilizare multiplă la un singur pacient
	ATENȚIONARE		Baterie litu-ion 3,7V
	ATENȚIE		Dispozitiv medical
	Curent continuu		Distribuit